

# KLINISK RISIKOAFFALD UN3291

Video for Use:



# 6

CM000356-ETICQUNUNFDK


## ADVARSEL

Fyld ikke over Fylde-linjen.  
Tving ikke kanyler i beholderen.  
Overstige ikke tilladt bruttomasse.


Model PACAZUR (Engangsbeholdere)	30	50C	50	60
Ref. skruelåg / standard låg	PO/PP30JJ 30 L	PO/PP47JJ 47 L	PO/PP50JJ 50 L	PO/PP60JJ 60 L
Nominel kapacitet	30 L	47 L	50 L	60 L
Fyld volumen	25 L	39 L	43 L	53 L
<b>Maks. Tilladte bruttomasse</b>	20 kg	20 kg	25 kg	30 kg

### MONTAGE AF LÅG

1) Placer låget på beholderen

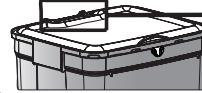

2) Klik hængslet på beholderen

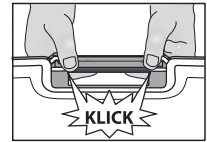

ISO 23907



### MIDLERTIDIG LUKNING

#### Standard låg



#### Midlertidig lukning:

Tryk på toppen af låget ved splitten så vingerne klemmes ud.


#### Åbning af låget:

Klem vingerne sammen ved splitten.

#### Skruelåg

**Position 0 :**  
tryk proppen for indsætte.

**Position 2 :**  
midlertidig lukning

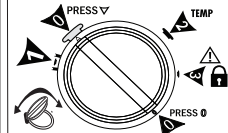

**Position 1 :**  
Åbn med hængslet

**Position 3 :**  
permanent lukning


### PERMANENT LUKNING

1) Inden permanent lukning af beholder, sørg for at låget passer præcist i beholderens kant inden låget klipses fast, især hvis beholderen er blevet vredet en smule ved opfyldning.

2) Ved hver clips trykkes på både låg og beholder på samme tid



Låget er forsejlet med 11 clips i kanten (indikeret ved "Press")

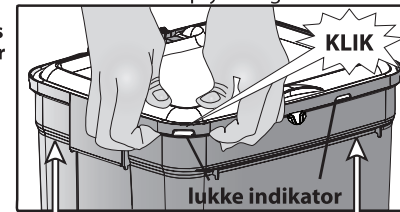

**FYLDNINGSGRÆNSE**  
**FYLD IKKE OVER DENNE LINJE**

Instruktionsanvisninger: [http://www.plazur.fr/downloads/USE\\_PACAZUR\\_DK.PDF](http://www.plazur.fr/downloads/USE_PACAZUR_DK.PDF)

Afsender

Navn / afdeling:

Dato: / / 20